

USO CORRECTO DEL CUBREBOCAS 3 CAPAS



1
Antes de colocarla, lávate las manos por al menos 20 segundos.



2
Revisa cual es el lado correcto (las costuras gruesas corresponden a la parte interna del cubrebocas).



3
Pasa por tus orejas las cintas elásticas y colócalo cubriendo completamente tu nariz y boca.



4
Usando la laminilla superior ajusta el cubrebocas a la forma de tu nariz y evita tocarlo posteriormente



5
Aún con cubrebocas, cubre boca y nariz al toser y estornudar con el ángulo interno del brazo.




6
Al desecharlo destruye con tijeras y coloca los restos en un contenedor con bolsa.



7
Después de desechar el cubrebocas desinfecta las tijeras y lávate la manos.

COVID-19
#QuédateEnCasa

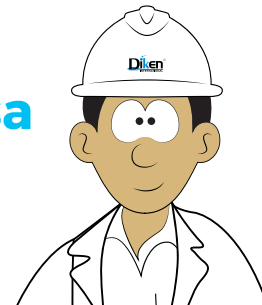

OFICINA CORPORATIVA MÉXICO

(844) 866 95 20

www.dikeninternational.com • comentarios@dikeninternational.com